

# 4DryField® PH

PROVIDES HEMOSTASIS – PREVENTS ADHESIONS



## 1 produkt - 2 sposoby aplikacji


### Hemostatyczny proszek - żel 4DF

#### 1. wysusz i zaaplikuj



Osusz ranę i zaaplikuj proszek 4DF bezpośrednio na miejsce krwawienia.

#### 2. przytrzymaj

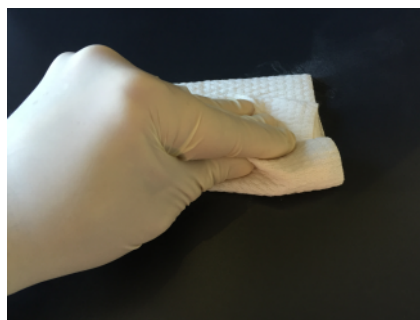

Ucisnąć bezpośrednio za pomocą zwilżonej gazy do czasu zatrzymania krwawienia.

#### 3. nawilż



Zwilżyć gazę oraz nadmiar proszku, by zapobiec wytworzeniu połączenia skrzepu i gazy

\* pomijalne przy dużych powierzchniach krwawienia oraz przy sączeniach

### Zapobieganie zrostom - żel 4DF

#### 1. zaaplikuj na ranę



Proszek 4DF równo rozprowadzony na powierzchni rany

#### 2. zmiana w żel




Delikatnie skrop 0,9% roztworem NaCl, by proszek został przekształcony w żel

#### 3. dawkowanie żelu



Na 5 g proszku wystarczy użyć 20-40 ml roztworu

### Aplikacja laparoskopowa

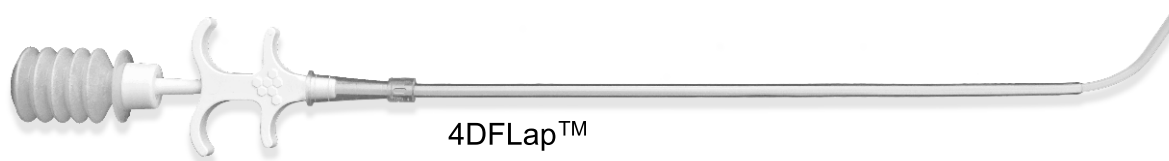

4DFLap™